





**Starviewer**  
Medical Imaging Software

## Starviewer 2.0

### Guía de atajos

Icono	Función	Atajo	Icono	Función	Drecera
	Vista axial (visor actual) (todos los visores)	<b>Ctrl</b> + <b>1</b> <b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>1</b>		Ventana nueva	<b>Ctrl</b> + <b>N</b>
	Vista sagital (visor actual) (todos los visores)	<b>Ctrl</b> + <b>2</b> <b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>2</b>		Cierra la pestaña	<b>Ctrl</b> + <b>W</b>
	Vista coronal (visor actual) (todos los visores)	<b>Ctrl</b> + <b>3</b> <b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>3</b>		Sale	<b>Ctrl</b> + <b>Q</b>
	Captura la imagen actual	<b>Ctrl</b> + <b>S</b>		Estudios de la base de datos local	<b>Ctrl</b> + <b>L</b>
	Captura toda la serie	<b>Ctrl</b> + <b>A</b>		PACS	<b>Ctrl</b> + <b>P</b>
	Borra todas las anotaciones	<b>Ctrl</b> + <b>E</b>		Abre un DICOMDIR	<b>Ctrl</b> + <b>D</b>
	Restablece el visor en el estado inicial	<b>Ctrl</b> + <b>R</b>		Obre ficheros	<b>Ctrl</b> + <b>O</b>
	Ángulo de Cobb	<b>⇧</b> + <b>A</b>		Abre los ficheros de un directorio	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>D</b>
	ROI poligonal	<b>⇧</b> + <b>R</b>		Maximiza a múltiples pantallas	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>M</b>
	Lupa	<b>⇧</b> + <b>Z</b>		Desplaza a la pantalla anterior	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>←</b>
	Dessincroniza todos los visores	<b>⇧</b> + <b>U</b> <b>n</b> <b>o</b>		Desplaza a la pantalla siguiente	<b>Ctrl</b> + <b>⇧</b> + <b>→</b>
	Aplicaciones externas	<b>⇧</b> + <b>F1</b> ... <b>F12</b>			